

ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ СИЗ

КОСТЮМ ИЗОЛИРУЮЩЕГО ТИПА С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ ВОЗДУХА, ГОСТ 12.4.240-2013





ШАГ 1
НАДЕТЬ
НАТЕЛЬНОЕ
БЕЛЬЕ, получить костюм, фильтры и пару перчаток



ШАГ 2
ВКРУТИТЬ
ФИЛЬТРЫ
в соединительные разъемы костюма




ШАГ 3-4
ПРИСОЕДИНИТЬ ШЛАНГИ системы распределения воздушного потока к фильтрам и ФВУ*

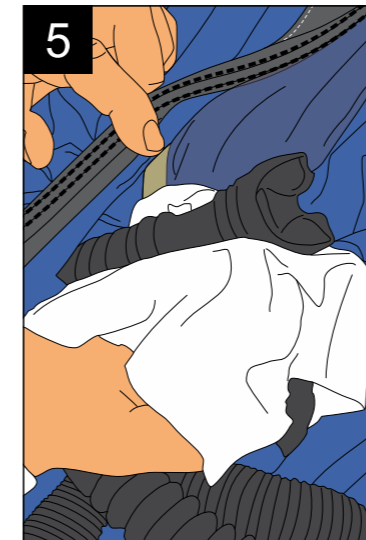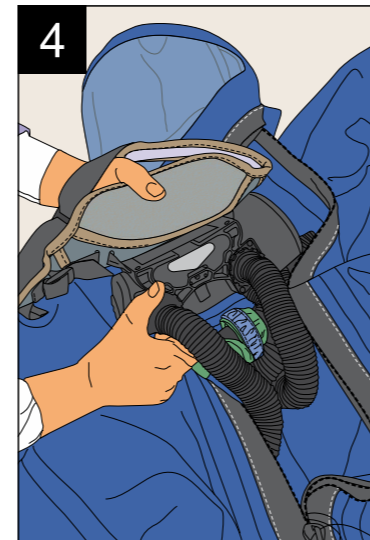


ШАГ 5
ПРОВЕСТИ
ДЕЗИНФЕКЦИЮ загубника и лицевой части костюма изнутри 70 % спиртовым раствором



ШАГ 6
ПООЧЕРЕДНО
НАДЕТЬ
ШТАНИНЫ, зафиксировав ФВУ* на поясе

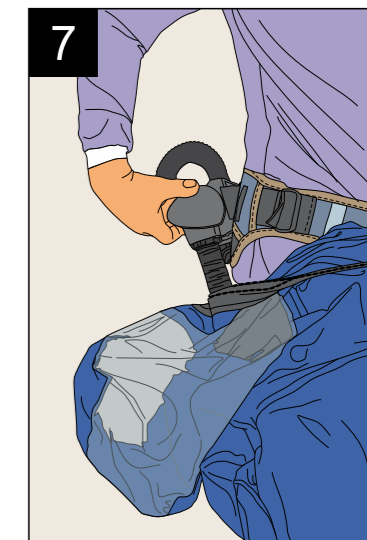

ШАГ 7
ВКЛЮЧИТЬ
ФВУ*

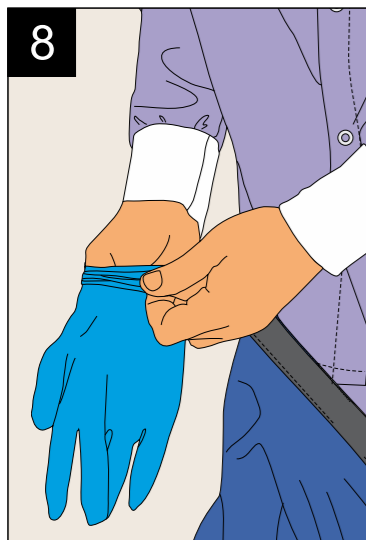

ШАГ 8
НАДЕТЬ
ПЕРВУЮ ПАРУ
ПЕРЧАТОК, предварительно проверенных на целостность




ШАГ 9
ПООЧЕРЕДНО
НАДЕТЬ
РУКАВА



ШАГ 10
НАДЕТЬ
КАПЮШОН, проверив исправность загубника



ШАГ 11
ПООЧЕРЕДНО
ЗАСТЕГНУТЬ
МОЛНИИ, убедившись, что слайдер вошел в паз, обеспечив герметичность костюма

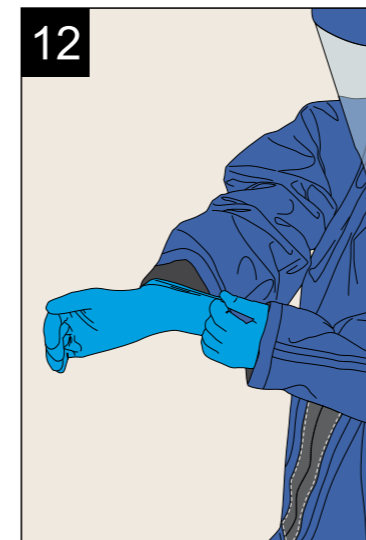


ШАГ 12
НАДЕТЬ
ВТОРУЮ ПАРУ
ПЕРЧАТОК поверх манжет, при необходимости воспользоваться третьей парой перчаток

ВАЖНО!

ДЕЖУРНЫЙ ДОЛЖЕН
УБЕДИТЬСЯ В
ПРАВИЛЬНОСТИ
НАДЕВАНИЯ
ИЗОЛИРУЮЩЕГО
КОСТЮМА!




ПОСЛЕ ТОГО КАК
ИЗОЛИРУЮЩИЙ КОСТЮМ
ПОЛНОСТЬЮ НАДЕТ,
ПРОВЕРИТЬ ЕГО
В СПЕЦИАЛЬНОЙ КАМЕРЕ
В СРЕДЕ РАЗДРАЖАЮЩЕГО
ВЕЩЕСТВА
(аммиак, хлорпикрин и т.д.).

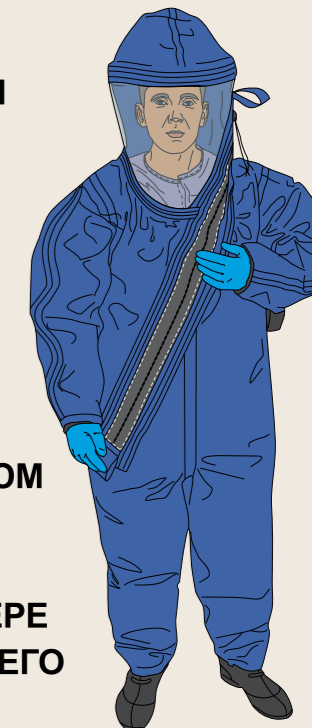

* - Фильтро-вентиляционная установка

ПОРЯДОК СНЯТИЯ СИЗ

КОСТЮМ ИЗОЛИРУЮЩЕГО ТИПА С ПРИНУДИТЕЛЬНОЙ ПОДАЧЕЙ ВОЗДУХА, ГОСТ 12.4.240-2013

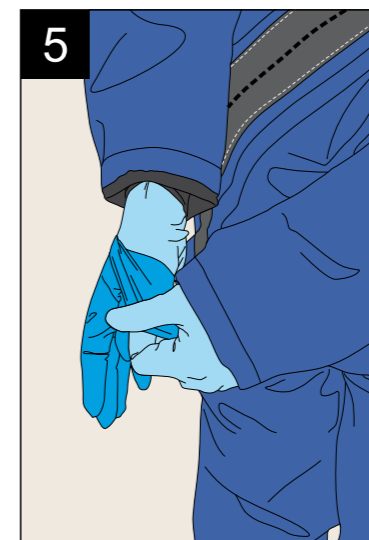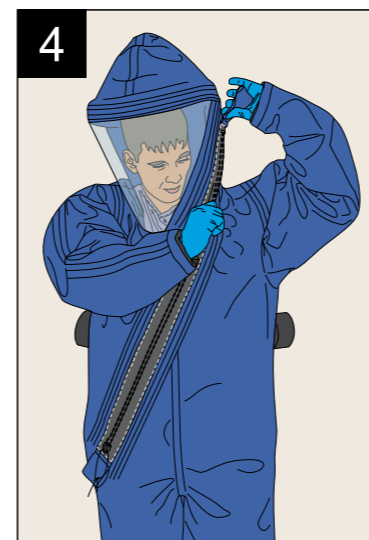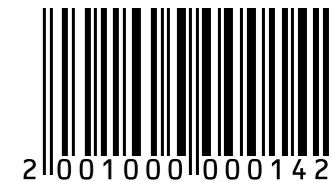


ШАГ 1-2
ОБРАБОТАТЬ КОСТЮМ
В ДЕЗИНФЕКЦИОННОМ ДУШЕ,
затем расстегнуть первую молнию и тщательно обработать труднодоступные места и скрытые полости.

ШАГ 3
СМЫТЬ ОСТАТКИ
ДЕЗРАСТВОРА
водой и выйти из дезинфекционного душа (см. «Важно!»)

ШАГ 4
РАССТЕГНУТЬ
ВТОРУЮ
МОЛНИЮ

ШАГ 5
СНЯТЬ ВЕРХНЮЮ
ПАРУ ПЕРЧАТОК
и погрузить их в емкость для обеззараживания

ШАГ 6
СНЯТЬ
КАПЮШОН
С ГОЛОВЫ
и поочередно вытащить руки из рукавов

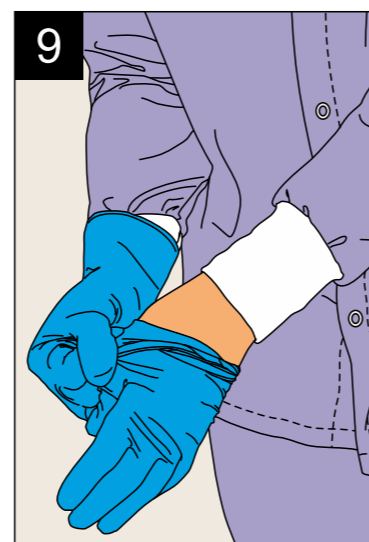

ШАГ 7
ОТКЛЮЧИТЬ
И СНЯТЬ ФВУ*


ШАГ 8
СНЯТЬ КОСТЮМ,
поочередно вытащив ноги из брючин, и убрать для сушки и окончательной обработки

ШАГ 9
СНЯТЬ ВТОРУЮ
ПАРУ ПЕРЧАТОК,
выворачивая наизнанку, и погрузить их в емкость для обеззараживания

ШАГ 10
СНЯТЬ
НАТЕЛЬНОЕ
БЕЛЬЕ, погрузив его в емкость для обеззараживания, и пройти в душ

ВАЖНО!

ПРИ ПОПАДАНИИ АГРЕССИВНЫХ ВЕЩЕСТВ НА КОЖУ ПОРАЖЕННЫЙ УЧАСТОК СЛЕДУЕТ ТЩАТЕЛЬНО ПРОМЫТЬ И, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ!

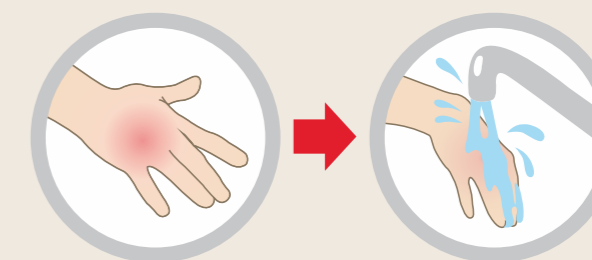

* - Фильтро-вентиляционная установка