



# ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ СИЗ

ПРОТИВОЧУМНЫЙ КОМПЛЕКТ С КОМБИНЕЗОНОМ

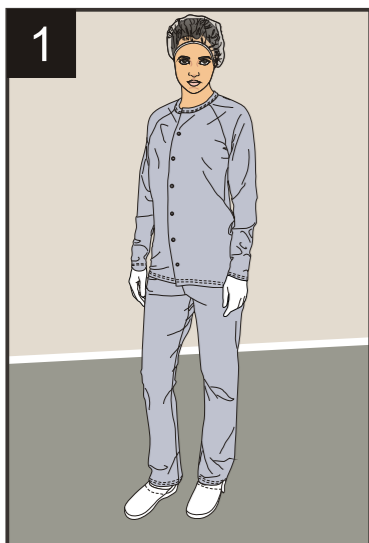

## ШАГ 1 НАДЕТЬ РАБОЧУЮ ОДЕЖДУ

(пижаму, медицинскую шапочку, носки, обувь и перчатки для переобувания).

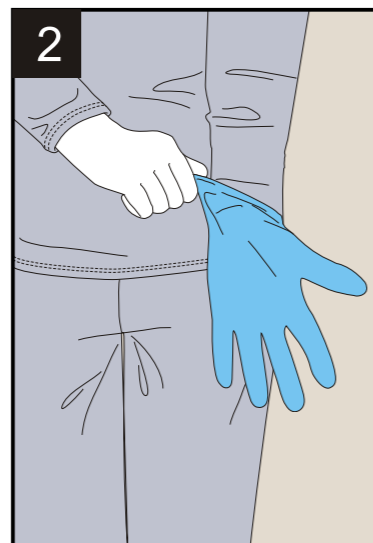

## ШАГ 2 НАДЕТЬ ВТОРУЮ ПАРУ ПЕРЧАТОК

с защитой от проколов и порезов, проверив их целостность (воздухом).



## ШАГ 3 НАДЕТЬ ШЛЕМ

Шлем должен закрывать лоб до бровей, шею до подбородка. Лицевые вставки должны быть расправлены.




## ШАГИ 4-6 НАДЕТЬ КОМБИНЕЗОН

**Шаг 4** Взять комбинезон следующим образом: правой рукой держим правый рукав за манжет и правую брючину за низ, левой рукой держим левый рукав за манжет и левую брючину за низ.

**Шаг 5** Завести ногу, аккуратно отпуская брючину так, чтобы она не касалась пола, при этом не выпускайте из рук манжеты рукавов. Комбинезон надеть так, чтобы шлем был заправлен под него.

**Шаг 6** Надевая рукава, накинуть на большой палец петлю-напальчник.

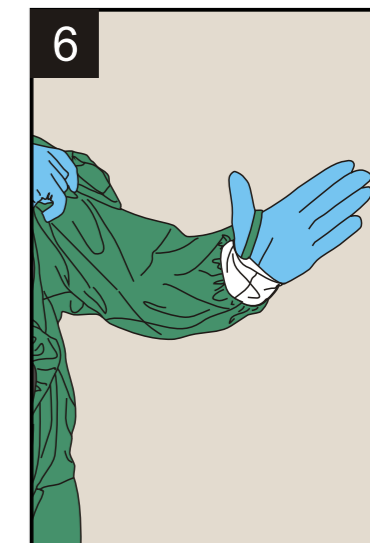

## ШАГ 7 ЗАСТЕГНУТЬ КОМБИНЕЗОН

Взять молнию левой рукой за нижнюю часть и потянуть её вниз, расправляя. Правой рукой застегнуть молнию до конца.



## ШАГ 8 НАДЕТЬ РЕСПИРАТОР

Верхний край респиратора должен находиться на уровне переносицы, а нижний – под подбородком. Лицевые вставки должны быть заправлены под респиратор.



## ШАГ 9 НАДЕТЬ ОЧКИ

Очки должны быть подогнаны по обхвату головы и плотно прилегать обтюратором к поверхностям: лица, респиратора и лицевых вставок.



## ШАГ 10 НАДЕТЬ БАХИЛЫ

Убедитесь, что внутренние брючины заправлены под бахилы и пристёгнуты к ним, а наружные брючины покрывают бахилы снаружи.

**ПОСЛЕ ТОГО, КАК ПРОТИВОЧУМНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОЛНОСТЬЮ НАДЕТ, НАДЕНЬТЕ ТРЕТЬЮ ПАРУ ПЕРЧАТОК (ПРОВЕРИВ ИХ ЦЕЛЮСТНОСТЬ ВОЗДУХОМ). МАНЖЕТ ПЕРЧАТКИ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОВЕРХ МАНЖЕТА КОМБИНЕЗОНА. ЗАЛОЖИТЕ ПОЛОТЕНЦЕ ЗА ПОЯС С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ.**



**ПУТЁМ ВИЗУАЛЬНОГО ОСМОТРА СЕБЯ В ЗЕРКАЛЕ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ЭЛЕМЕНТЫ ЗАЩИТНОГО КОМПЛЕКТА НАДЕТЫ ПРАВИЛЬНО: ОТСУТСТВУЮТ НЕПОКРЫТЫЕ КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ И ЗАЗОРЫ МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТАМИ КОМПЛЕКТА.**

# ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ СИЗ

ПРОТИВОЧУМНЫЙ КОМПЛЕКТ С ХАЛАТОМ


LAMSYSTEMS

**PASTERIS**

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
ДЛЯ РАБОТЫ С МИКРООРГАНИЗМАМИ



www.lamsystems-lto.ru

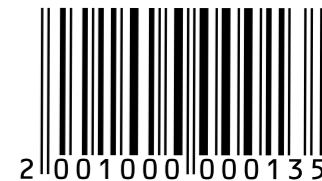

**ШАГ 1  
НАДЕТЬ  
РАБОЧУЮ  
ОДЕЖДУ** (пижаму, медицинскую шапочку, носки, обувь и перчатки для переодевания).




**ШАГ 2  
НАДЕТЬ ВТОРУЮ  
ПАРУ ПЕРЧАТОК**  
с защитой от проколов и порезов, проверив их целостность (воздухом).




**ШАГ 3  
НАДЕТЬ ШЛЕМ**  
Шлем должен закрывать лоб до бровей, шею до подбородка. Лицевые вставки должны быть расправлены.



**ШАГ 4 НАДЕТЬ  
ХАЛАТ** Нижняя часть шлема должна быть заправлена под халат. Просуньте руки в рукава так, чтобы фиксирующие элементы оказались на спине. Надевая рукава, накиньте на большой палец петлю-напальчник.

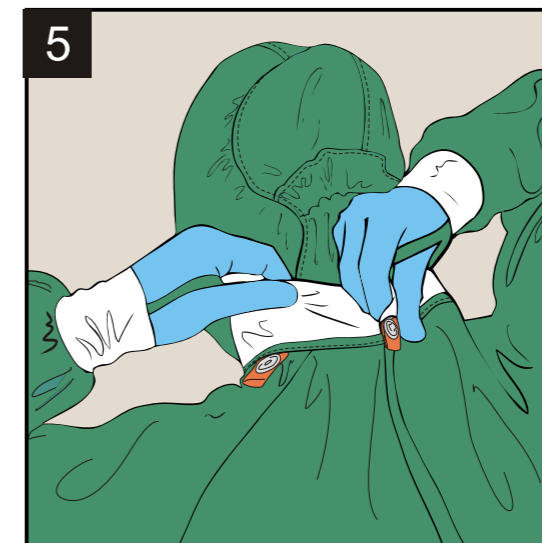

**ШАГ 5  
ЗАСТЕГНУТЬ  
КНОПКИ НА  
ГОРЛОВИНЕ**  
в соответствии с цветовой индикацией.

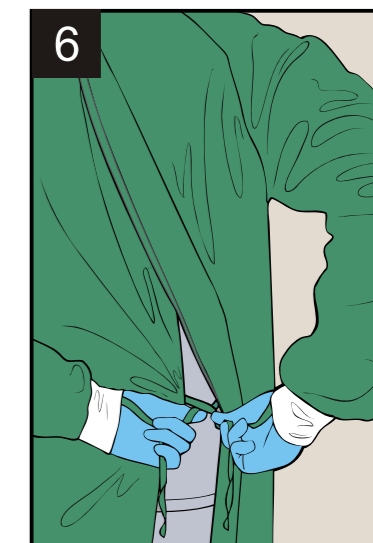


**ШАГ 6  
ЗАВЯЗАТЬ  
ВНУТРЕННИЙ  
ПОЯС ХАЛАТА**



**ШАГ 7  
ЗАВЯЗАТЬ  
НАРУЖНЫЙ  
ПОЯС ХАЛАТА**  
на талии спереди с левой стороны.



**ШАГ 8  
НАДЕТЬ  
РЕСПИРАТОР**  
Верхний край респиратора должен находиться на уровне переносицы, а нижний – под подбородком. Лицевые вставки должны быть заправлены под респиратор.

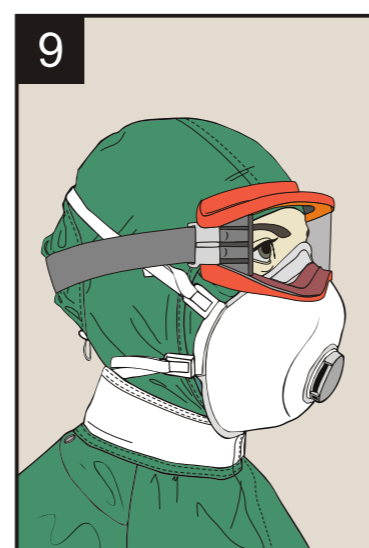

**ШАГ 9  
НАДЕТЬ ОЧКИ**  
Очки должны быть подогнаны по обхвату головы и плотно прилегать обтюратором к поверхностям: лица, респиратора и лицевых вставок.



**ШАГ 10  
НАДЕТЬ  
БАХИЛЫ**  
Для предотвращения сползания бахил пристегнуть их на кнопки к брючинам нательного белья.

ПОСЛЕ ТОГО, КАК ПРОТИВОЧУМНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОЛНОСТЬЮ НАДЕТ, НАДЕНЬТЕ ТРЕТЬЮ ПАРУ ПЕРЧАТОК (ПРОВЕРИВ ИХ ЦЕЛОСТНОСТЬ ВОЗДУХОМ), МАНЖЕТ ПЕРЧАТКИ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОВЕРХ МАНЖЕТА ХАЛАТА. ЗАЛОЖИТЕ ПОЛОТЕНЦЕ ЗА ПОЯС С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ.

ПУТЁМ ВИЗУАЛЬНОГО ОСМОТРА СЕБЯ В ЗЕРКАЛЕ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ЭЛЕМЕНТЫ ЗАЩИТНОГО КОМПЛЕКТА НАДЕТЫ ПРАВИЛЬНО: ОТСУТСТВУЮТ НЕПОКРЫТЫЕ КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ И ЗАЗОРЫ МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТАМИ КОМПЛЕКТА.



# ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ СИЗ

ПРОТИВОЧУМНЫЙ КОМПЛЕКТ С КОМБИНЕЗОНОМ (С ПОЛНОЛИЦЕВОЙ МАСКОЙ)


LAMSYSTEMS

## PASTERIS


СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
ДЛЯ РАБОТЫ С МИКРООРГАНИЗМАМИ




www.lamsystems-lto.ru

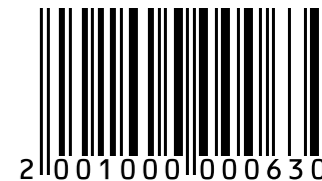

**ШАГ 1 НАДЕТЬ РАБОЧУЮ ОДЕЖДУ** (пижаму, медицинскую шапочку, носки, обувь и перчатки для переодевания).

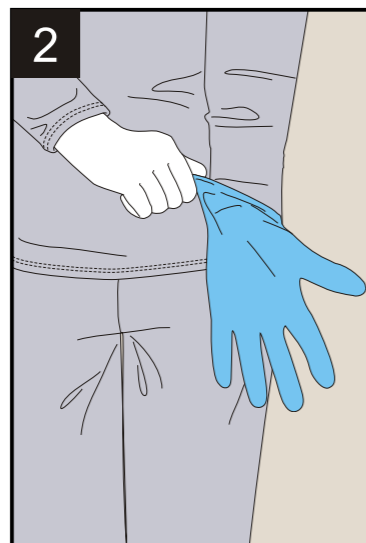


**ШАГ 2 НАДЕТЬ ВТОРУЮ ПАРУ ПЕРЧАТОК** с защитой от проколов и порезов, проверив их целостность (воздухом).

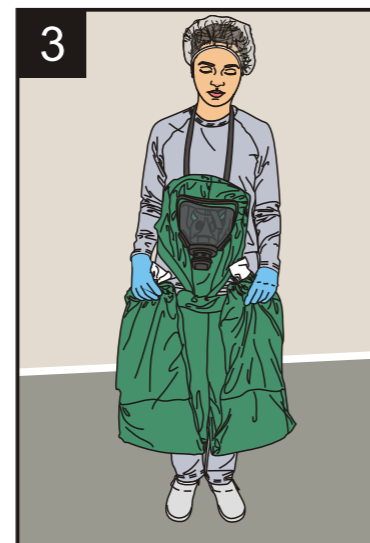

**ШАГИ 3-5 НАДЕТЬ КОМБИНЕЗОН**

**Шаг 3** Надеть на шею петлю-держатель маски и взять комбинезон следующим образом: правой рукой держать правый рукав за манжет и правую брючину за низ, левой рукой держать левый рукав за манжет и левую брючину за низ.  
**Шаг 4** Завести ногу в брючину, аккуратно отпуская её так, чтобы она не касалась пола, при этом не выпускать из рук манжеты рукавов.  
**Шаг 5** Надеть рукава, накинуть на большой палец петлю-напальчник.

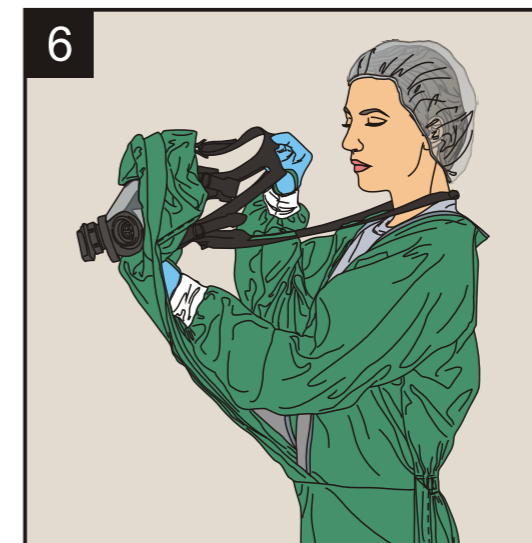

**ШАГ 6 НАДЕТЬ МАСКУ**

Ослабить оголовье маски и, оттянув его, надеть маску на голову. Отрегулировать маску по объёму головы.



**ШАГ 7 НАДЕТЬ ШЛЕМ**




**ШАГ 8 ЗАСТЕГНУТЬ КОМБИНЕЗОН**  
Застегнуть круговую застежку-молнию. Прикрыть застёгнутую молнию защитной планкой.



**ШАГ 9 УСТАНОВИТЬ ФИЛЬТРЫ**  
Поочерёдно присоединить фильтры к маске.



**ШАГ 10 НАДЕТЬ БАХИЛЫ**  
Убедиться, что внутренние брючины заправлены под бахилы и пристёгнуты к ним, а наружные брючины покрывают бахилы снаружи.

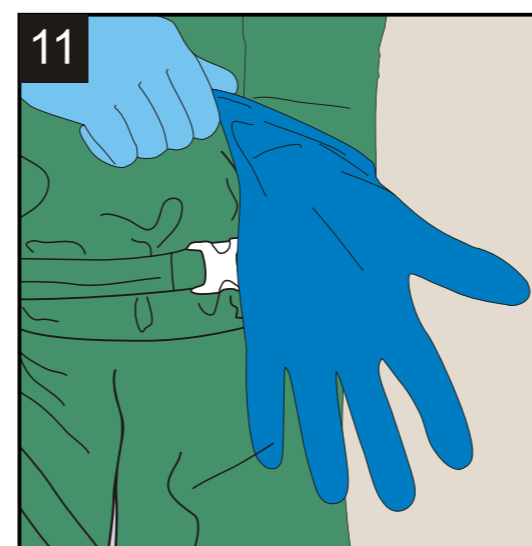

**ШАГ 11 НАДЕТЬ ТРЕТЬЮ ПАРУ ПЕРЧАТОК** с защитой от проколов и порезов, проверив их целостность (воздухом). Манжет перчатки должен быть надет поверх манжета комбинезона.

**ПОСЛЕ ТОГО, КАК ПРОТИВОЧУМНЫЙ КОМПЛЕКТ НАДЕТ, ЗАЛОЖИТЬ ПОЛОТЕНЦЕ ЗА ПОЯС С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ.**




**ПУТЁМ ВИЗУАЛЬНОГО ОСМОТРА СЕБЯ В ЗЕРКАЛЕ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ЭЛЕМЕНТЫ ЗАЩИТНОГО КОМПЛЕКТА НАДЕТЫ ПРАВИЛЬНО: ОТСУТСТВУЮТ НЕПОКРЫТЫЕ КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ И ЗАЗОРЫ МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТАМИ КОМПЛЕКТА.**





# ПОРЯДОК СНЯТИЯ СИЗ

## PASTERIS

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
ДЛЯ РАБОТЫ С МИКРООРГАНИЗМАМИ

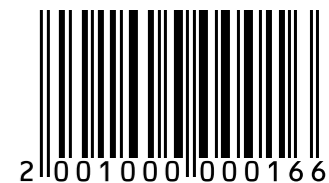

ПРОТИВОЧУМНЫЙ КОМПЛЕКТ С КОМБИНЕЗОНОМ

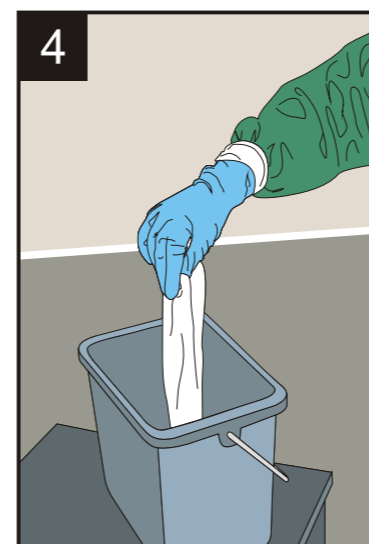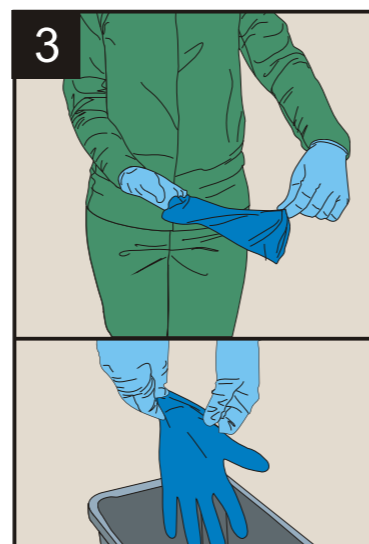

### ШАГ 1 ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПЕРЧАТОК

Погрузить руки в перчатках в дезинфицирующий раствор, тщательно обмыть со всех сторон.

### ШАГ 2 ДЕЗИНФЕКЦИЯ БАХИЛ

Поочередно ставя ноги в ёмкость с дезраствором, поднять наружную брючину, и протереть её внутреннюю поверхность и бахилу сверху вниз.

### ШАГ 3 СНЯТЬ ВЕРХНЮЮ ПАРУ ПЕРЧАТОК



Проверить их целостность (дезраствором). Погрузить их в ёмкость для обеззараживания.

### ШАГ 4 ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОЛОТЕНЦА

Достать полотенце из-за пояса и погрузить его в ёмкость для обеззараживания.

### ШАГИ 5-6 СНЯТЬ ОЧКИ И РЕСПИРАТОР (ПОЛНОЛИЦЕВУЮ МАСКУ)

Оттянуть очки от лица двумя руками в направлении вперед, затем вверх и назад за голову, снимая. Опустить в ёмкость для обеззараживания. Аналогично снять респиратор и погрузить в ёмкость для обеззараживания.

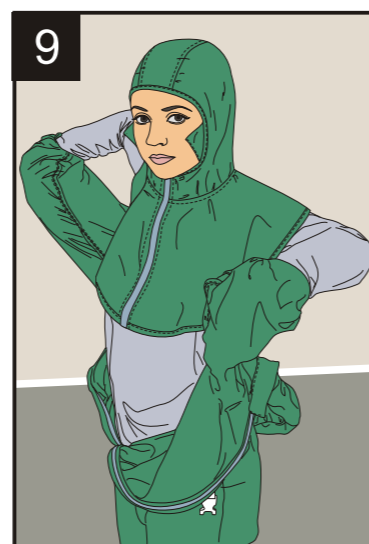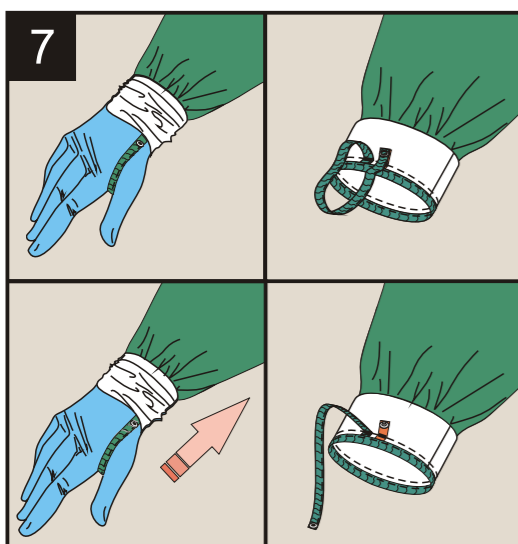

### ШАГ 7 РАССТЕГНУТЬ ПЕТЛЮ-НАПАЛЬЧНИК

Потянуть изделие за рукав в районе внутреннего локтевого сгиба на себя до щелчка. Фиксирующая кнопка расстегнется.

### ШАГ 8 СНЯТЬ БАХИЛЫ

Поднять наружную брючину, снять бахилы, расстегнув молнию и отгибая борты изнаночной стороной наружу. Погрузить в ёмкость для обеззараживания.

### ШАГ 9 СНЯТЬ КОМБИНЕЗОН

Расстегнуть молнию. Снять комбинезон, выворачивая его на изнанку. Погрузить в ёмкость для обеззараживания.

### ШАГ 10 СНЯТЬ ШЛЕМ

Расстегнуть молнию шлема. Собрать края пелеринки на затылке в одну руку и снять шлем. Погрузить шлем в ёмкость для обеззараживания.

### ШАГ 11 СНЯТЬ ПЕРЧАТКИ

Снять вторые перчатки с защитой от проколов и порезов и перчатки для переодевания, выворачивая наизнанку, и опустить их в ёмкость для обеззараживания.

**ВАЖНО!**


**ПЕРЧАТКИ  
ОБМЫВАЮТСЯ  
ДЕЗРАСТВОРОМ  
ПОСЛЕ СНЯТИЯ  
КАЖДОГО  
ЭЛЕМЕНТА  
ЗАЩИТНОЙ  
ОДЕЖДЫ**






# ПОРЯДОК СНЯТИЯ СИЗ

## PASTERIS

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
ДЛЯ РАБОТЫ С МИКРООРГАНИЗМАМИ

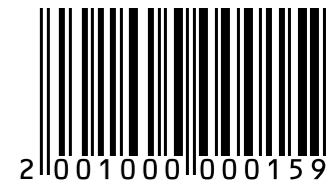

ПРОТИВОЧУМНЫЙ КОМПЛЕКТ С ХАЛАТОМ

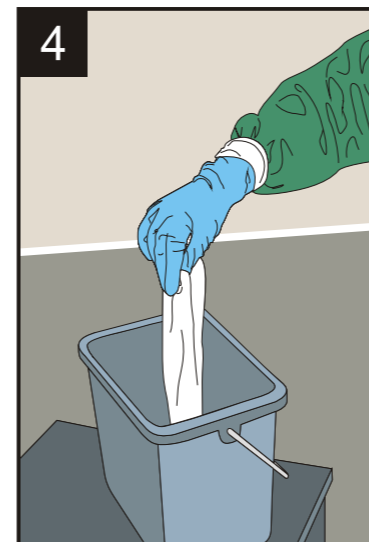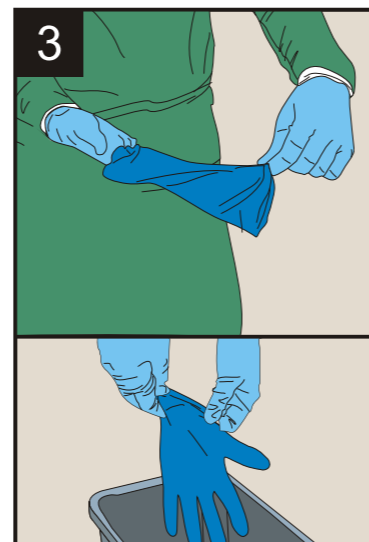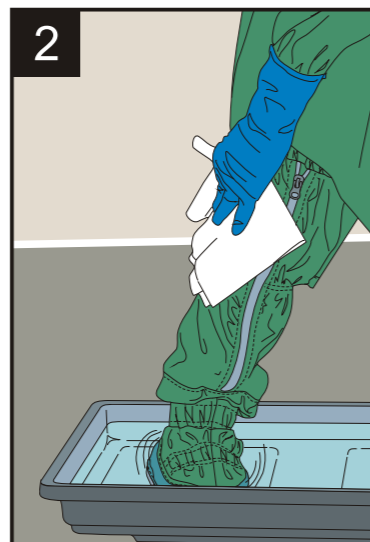

### ШАГ 1 ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПЕРЧАТОК

Погрузить руки в перчатках в дезинфицирующий раствор, тщательно обмыть со всех сторон.

### ШАГ 2 ДЕЗИНФЕКЦИЯ БАХИЛ

Поочередно ставя ноги в ёмкость с дезраствором, протереть бахилы сверху вниз.

### ШАГ 3 СНЯТЬ ВЕРХнюю ПАРУ ПЕРЧАТОК


Проверить их целостность (дезраствором). Погрузить в ёмкость для обеззараживания.

### ШАГ 4 ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОЛОТЕНЦА

Достать полотенце из-за пояса и погрузить его в ёмкость для обеззараживания.

### ШАГИ 5-6 СНЯТЬ ОЧКИ И РЕСПИРАТОР (полнолицевую маску)

Оттянуть очки от лица двумя руками в направлении вперед, затем вверх и назад за голову, снять. Опустить в ёмкость для обеззараживания. Аналогично снять респиратор и погрузить в ёмкость для обеззараживания.

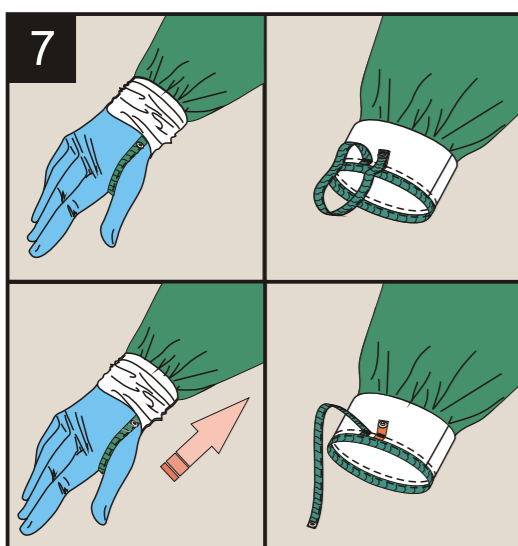

### ШАГ 7 РАССТЕГНУТЬ ПЕТЛЮ-НАПАЛЬЧНИК

Потянуть изделие за рукав в районе внутреннего локтевого сгиба на себя до щелчка. Фиксирующая кнопка расстегнется.

### ШАГИ 8 СНЯТЬ ХАЛАТ

Расстегнуть кнопки ворота, развязать наружный и внутренний пояса. Снимать халат, сворачивая наружную его поверхность внутрь. Погрузить халат в ёмкость для обеззараживания.

### ШАГ 9 СНЯТЬ ШЛЕМ

Расстегнуть молнию шлема. Собрать края пелерины на затылке в одну руку и снять шлем. Погрузить шлем в ёмкость для обеззараживания.

### ШАГ 10 СНЯТЬ БАХИЛЫ

Расстегнуть молнию и снять бахилу, отгибая борты изнаночной стороной наружу. Погрузить в ёмкость для обеззараживания.

### ШАГ 11 СНЯТЬ ПЕРЧАТКИ

Снять вторые перчатки с защитой от проколов и порезов и перчатки для переодевания, выворачивая наизнанку, и опустить их в ёмкость для обеззараживания.

**ВАЖНО!**

**ПЕРЧАТКИ  
ОБМЫВАЮТСЯ  
ДЕЗРАСТВОРОМ  
ПОСЛЕ СНЯТИЯ  
КАЖДОГО  
ЭЛЕМЕНТА  
ЗАЩИТНОЙ  
ОДЕЖДЫ**

# ПОРЯДОК СНЯТИЯ СИЗ

ПРОТИВОЧУМНЫЙ КОМПЛЕКТ С КОМБИНЕЗОНОМ (С ПОЛНОЛИЦЕВОЙ МАСКОЙ)


LAMSYSTEMS

**PASTERIS**


СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
ДЛЯ РАБОТЫ С МИКРООРГАНИЗМАМИ



www.lamsystems-lto.ru

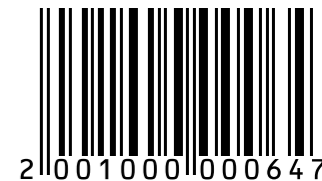


**ШАГ 1**  
**ДЕЗИНФЕКЦИЯ**  
**ПЕРЧАТОК И**  
**ПОЛОТЕНЦА**  
Обмыть руки в перчатках и промочить полотенце в дезрастворе.

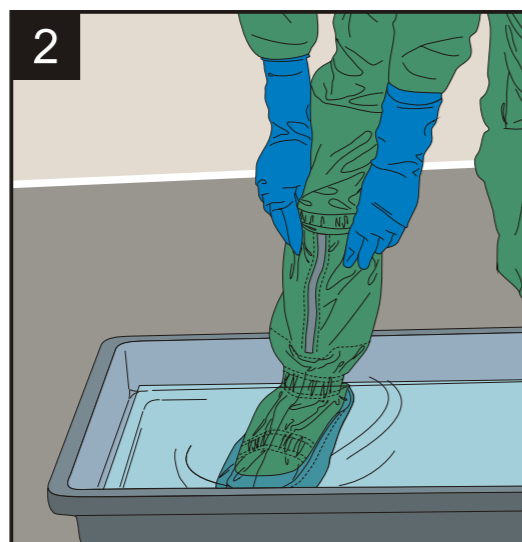


**ШАГ 2**  
**ДЕЗИНФЕКЦИЯ**  
**БАХИЛ** Поочередно ставя ноги в ёмкость с дезраствором, поднять наружную брючину, и протереть её внутреннюю поверхность и бахилу полотенцем сверху вниз.




**ШАГ 3**  
**ПРОТЕРЕТЬ**  
**МАСКУ**  
Протереть маску полотенцем, после чего опустить полотенце в дезраствор.

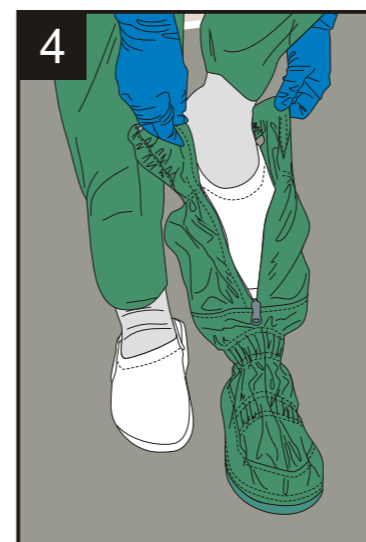

**ШАГ 4**  
**СНЯТЬ**  
**БАХИЛЫ**  
Поднять наружную брючину, расстегнуть молнию и снять бахилы, отгибая борты изнаночной стороной наружу.

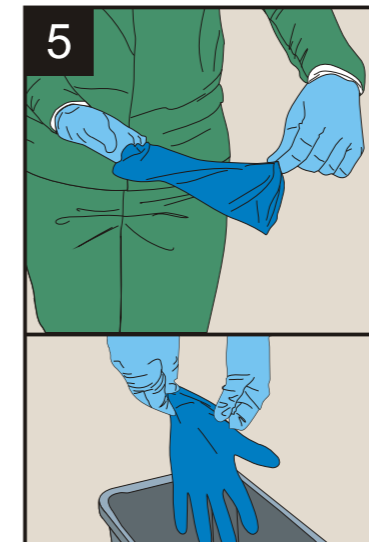


**ШАГ 5**  
**СНЯТЬ ВЕРХнюю**  
**ПАРУ ПЕРЧАТОК**  
Проверить их целостность (дезраствором).

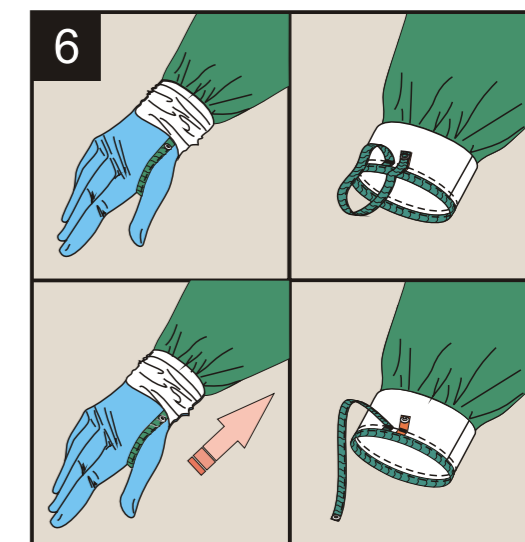

**ШАГ 6 РАССТЕГНУТЬ**  
**ПЕТЛЮ-НАПАЛЬЧИК**  
Потянуть рукав комбинезона в районе внутреннего локтевого сгиба на себя до щелчка. Фиксирующая кнопка расстегнется.



**ШАГ 7**  
**РАССТЕГНУТЬ**  
**КОМБИНЕЗОН**  
Отогнуть защитную планку и расстегнуть молнию.

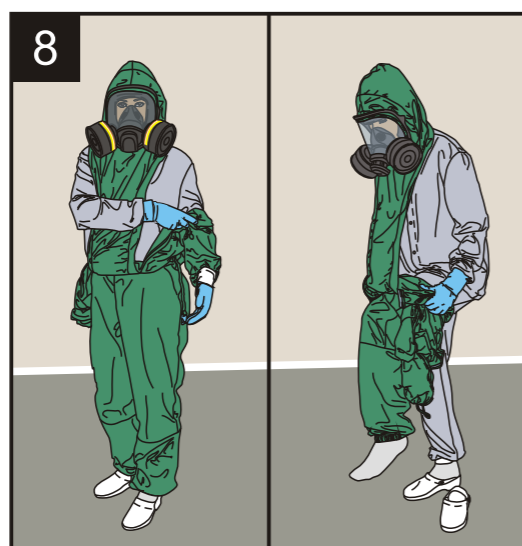

**ШАГ 8**  
**СНЯТЬ КОМБИНЕЗОН**  
Снять комбинезон, выворачивая его наизнанку, при этом петля-держатель маски остаётся на шее для удержания комбинезона на весу. Когда сняты рукава и брючины комбинезона, петлю-держатель снять через голову не касаясь головы и тела.



**ШАГ 9**  
**СНЯТЬ МАСКУ**  
**ПОЛНОЛИЦЕВУЮ**  
Отогнуть шлем изнаночной стороной наружу. Ослабить оголовье маски и снять, оттягивая его назад и вверх.



**ШАГ 10**  
**СНЯТЬ**  
**ФИЛЬТРЫ**  
Держа маску над ёмкостью с дезраствором, поочередно отсоединить фильтры и сложить их в ёмкость для обеззараживания.



**ШАГ 11**  
**СНЯТЬ ПЕРЧАТКИ**  
Снять вторые перчатки с защитой от проколов и порезов и перчатки для переодевания, выворачивая наизнанку, и опустить их в ёмкость для обеззараживания.

**ВАЖНО!**

**ПЕРЧАТКИ**  
**ОБМЫВАЮТСЯ**  
**ДЕЗРАСТВОРОМ**  
**ПОСЛЕ СНЯТИЯ**  
**КАЖДОГО**  
**ЭЛЕМЕНТА**  
**ЗАЩИТНОЙ**  
**ОДЕЖДЫ**