

# ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ СИЗ

ПРОТИВОЧУМНЫЙ КОМПЛЕКТ С КОМБИНЕЗОНОМ



## ШАГ 1 НАДЕТЬ РАБОЧУЮ ОДЕЖДУ

(пижаму, медицинскую шапочку, носки, обувь и перчатки для передевания).



## ШАГ 2 НАДЕТЬ ВТОРУЮ ПАРУ ПЕРЧАТОК

с защитой от проколов и порезов, проверив их целостность (воздухом).



## ШАГ 3 НАДЕТЬ ШЛЕМ

Шлем должен закрывать лоб до бровей, шею до подбородка. Лицевые вставки должны быть расправлены.





## ШАГИ 4-6 НАДЕТЬ КОМБИНЕЗОН

**Шаг 4** Взять комбинезон следующим образом: правой рукой держим правый рукав за манжет и правую брючину за низ, левой рукой держим левый рукав за манжет и левую брючину за низ.

**Шаг 5** Завести ногу, аккуратно отпуская брючину так, чтобы она не касалась пола, при этом не выпускайте из рук манжеты рукавов. Комбинезон надеть так, чтобы шлем был заправлен под него.

**Шаг 6** Надевая рукава, накинуть на большой палец петлю-напальчник.

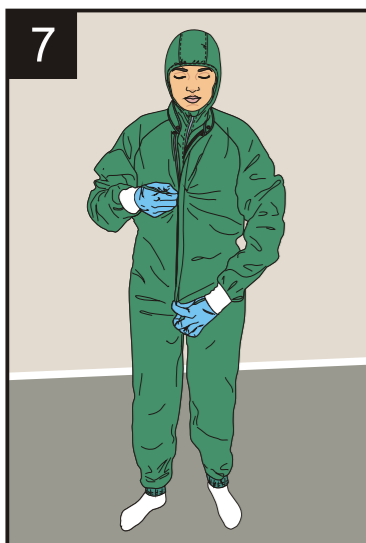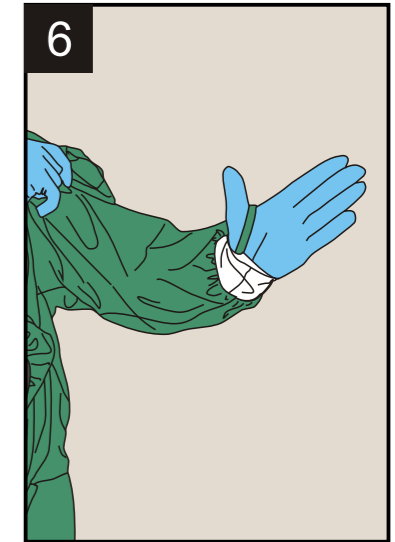

## ШАГ 7 ЗАСТЕГНУТЬ КОМБИНЕЗОН

Взять молнию левой рукой за нижнюю часть и потянуть её вниз, расправляя. Правой рукой застегнуть молнию до конца.



## ШАГ 8 НАДЕТЬ РЕСПИРАТОР

Верхний край респиратора должен находиться на уровне переносицы, а нижний – под подбородком. Лицевые вставки должны быть заправлены под респиратор.



## ШАГ 9 НАДЕТЬ ОЧКИ

Очки должны быть подогнаны по обхвату головы и плотно прилегать обтюратором к поверхностям: лица, респиратора и лицевых вставок.



## ШАГ 10 НАДЕТЬ БАХИЛЫ

Убедитесь, что внутренние брючины заправлены под бахилы и пристёгнуты к ним, а наружные брючины покрывают бахилы снаружи.

ПОСЛЕ ТОГО, КАК ПРОТИВОЧУМНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОЛНОСТЬЮ НАДЕТ, НАДЕНЬТЕ ТРЕТЬЮ ПАРУ ПЕРЧАТОК (ПРОВЕРИВ ИХ ЦЕЛЮСНОСТЬ ВОЗДУХОМ). МАНЖЕТ ПЕРЧАТКИ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОВЕРХ МАНЖЕТА КОМБИНЕЗОНА. ЗАЛОЖИТЕ ПОЛОТЕНЦЕ ЗА ПОЯС С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ.



ПУТЁМ ВИЗУАЛЬНОГО ОСМОТРА СЕБЯ В ЗЕРКАЛЕ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ЭЛЕМЕНТЫ ЗАЩИТНОГО КОМПЛЕКТА НАДЕТЫ ПРАВИЛЬНО: ОТСУТСТВУЮТ НЕПОКРЫТЫЕ КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ И ЗАЗОРЫ МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТАМИ КОМПЛЕКТА.

# ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ СИЗ

ПРОТИВОЧУМНЫЙ КОМПЛЕКТ С ХАЛАТОМ

LAMSYSTEMS

**PASTERIS**

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
ДЛЯ РАБОТЫ С МИКРООРГАНИЗМАМИ



**ШАГ 1  
НАДЕТЬ  
РАБОЧУЮ  
ОДЕЖДУ** (пижаму, медицинскую шапочку, носки, обувь и перчатки для переодевания).




**ШАГ 2  
НАДЕТЬ ВТОРУЮ  
ПАРУ ПЕРЧАТОК**  
с защитой от проколов и порезов, проверив их целостность (воздухом).




**ШАГ 3  
НАДЕТЬ ШЛЕМ**  
Шлем должен закрывать лоб до бровей, шею до подбородка. Лицевые вставки должны быть расправлены.



**ШАГ 4 НАДЕТЬ  
ХАЛАТ** Нижняя часть шлема должна быть заправлена под халат. Просуньте руки в рукава так, чтобы фиксирующие элементы оказались на спине. Надевая рукава, накиньте на большой палец петлю-напальчник.

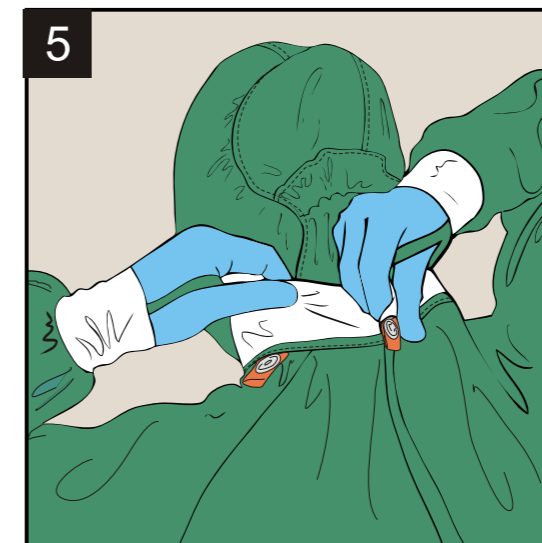

**ШАГ 5  
ЗАСТЕГНУТЬ  
КНОПКИ НА  
ГОРЛОВИНЕ**  
в соответствии с цветовой индикацией.

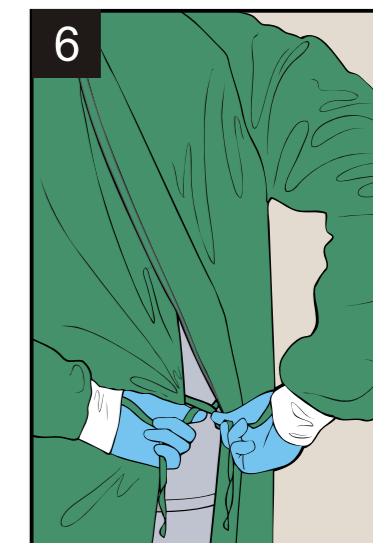


**ШАГ 6  
ЗАВЯЗАТЬ  
ВНУТРЕННИЙ  
ПОЯС ХАЛАТА**



**ШАГ 7  
ЗАВЯЗАТЬ  
НАРУЖНЫЙ  
ПОЯС ХАЛАТА**  
на талии спереди с левой стороны.



**ШАГ 8  
НАДЕТЬ  
РЕСПИРАТОР**  
Верхний край респиратора должен находиться на уровне переносицы, а нижний – под подбородком. Лицевые вставки должны быть заправлены под респиратор.

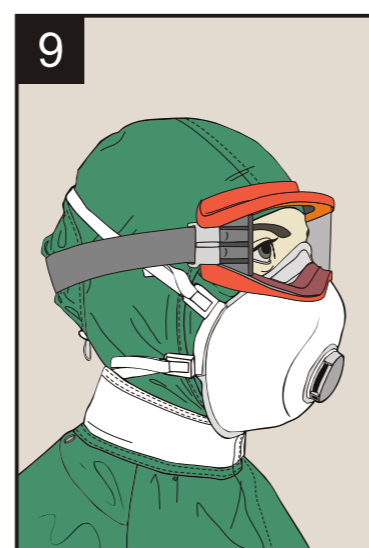

**ШАГ 9  
НАДЕТЬ ОЧКИ**  
Очки должны быть подогнаны по обхвату головы и плотно прилегать обтюратором к поверхностям: лица, респиратора и лицевых вставок.



**ШАГ 10  
НАДЕТЬ  
БАХИЛЫ**  
Для предотвращения сползания бахил пристегнуть их на кнопки к брючинам нательного белья.

ПОСЛЕ ТОГО, КАК ПРОТИВОЧУМНЫЙ КОМПЛЕКТ ПОЛНОСТЬЮ НАДЕТ, НАДЕНЬТЕ ТРЕТЬЮ ПАРУ ПЕРЧАТОК (ПРОВЕРИВ ИХ ЦЕЛОСТНОСТЬ ВОЗДУХОМ), МАНЖЕТ ПЕРЧАТКИ ДОЛЖЕН БЫТЬ ПОВЕРХ МАНЖЕТА ХАЛАТА. ЗАЛОЖИТЕ ПОЛОТЕНЦЕ ЗА ПОЯС С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ.

ПУТЁМ ВИЗУАЛЬНОГО ОСМОТРА СЕБЯ В ЗЕРКАЛЕ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ЭЛЕМЕНТЫ ЗАЩИТНОГО КОМПЛЕКТА НАДЕТЫ ПРАВИЛЬНО: ОТСУТСТВУЮТ НЕПОКРЫТЫЕ КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ И ЗАЗОРЫ МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТАМИ КОМПЛЕКТА.






# ПОРЯДОК НАДЕВАНИЯ СИЗ

## PASTERIS

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
ДЛЯ РАБОТЫ С МИКРООРГАНИЗМАМИ

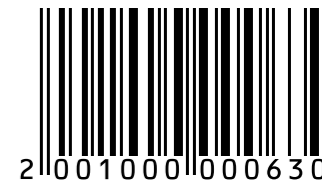

ПРОТИВОЧУМНЫЙ КОМПЛЕКТ С КОМБИНЕЗОНОМ (С ПОЛНОЛИЦЕВОЙ МАСКОЙ)



**ШАГ 1 НАДЕТЬ РАБОЧУЮ ОДЕЖДУ** (пижаму, медицинскую шапочку, носки, обувь и перчатки для переодевания).



**ШАГ 2 НАДЕТЬ ВТОРУЮ ПАРУ ПЕРЧАТОК** с защитой от проколов и порезов, проверив их целостность (воздухом).




**ШАГИ 3-5 НАДЕТЬ КОМБИНЕЗОН**

**Шаг 3** Надеть на шею петлю-держатель маски и взять комбинезон следующим образом: правой рукой держать правый рукав за манжет и правую брючину за низ, левой рукой держать левый рукав за манжет и левую брючину за низ.

**Шаг 4** Завести ногу в брючину, аккуратно отпуская её так, чтобы она не касалась пола, при этом не выпускать из рук манжеты рукавов.

**Шаг 5** Надеть рукава, накинуть на большой палец петлю-напальчник.

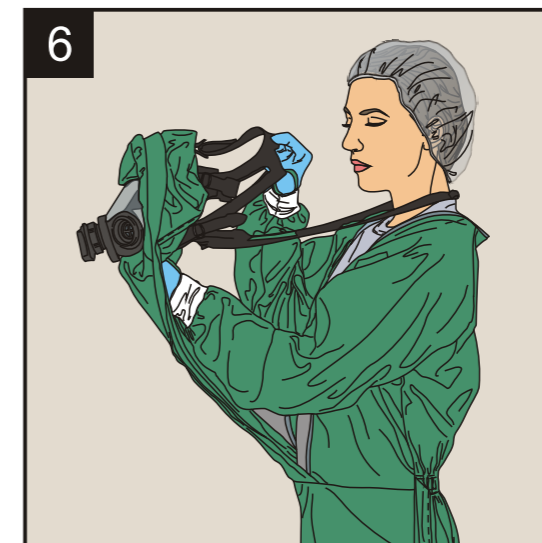

**ШАГ 6 НАДЕТЬ МАСКУ**

Ослабить оголовье маски и, оттянув его, надеть маску на голову. Отрегулировать маску по объёму головы.



**ШАГ 7 НАДЕТЬ ШЛЕМ**




**ШАГ 8 ЗАСТЕГНУТЬ КОМБИНЕЗОН**

Застегнуть круговую застежку-молнию. Прикрыть застёгнутую молнию защитной планкой.




**ШАГ 9 УСТАНОВИТЬ ФИЛЬТРЫ**

Поочерёдно присоединить фильтры к маске.

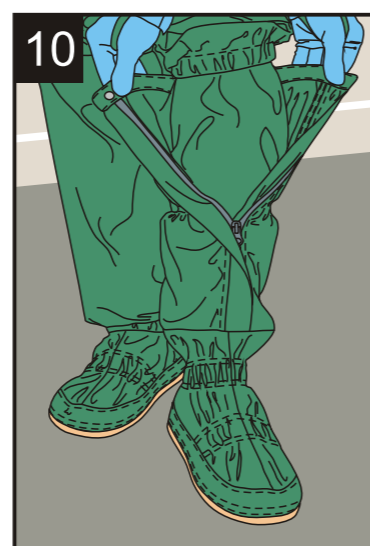


**ШАГ 10 НАДЕТЬ БАХИЛЫ**

Убедиться, что внутренние брючины заправлены под бахилы и пристёгнуты к ним, а наружные брючины покрывают бахилы снаружи.

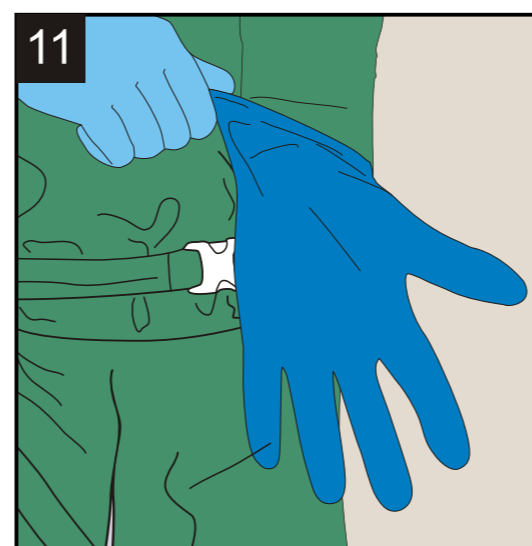

**ШАГ 11 НАДЕТЬ ТРЕТЬЮ ПАРУ ПЕРЧАТОК**

с защитой от проколов и порезов, проверив их целостность (воздухом). Манжет перчатки должен быть надет поверх манжета комбинезона.

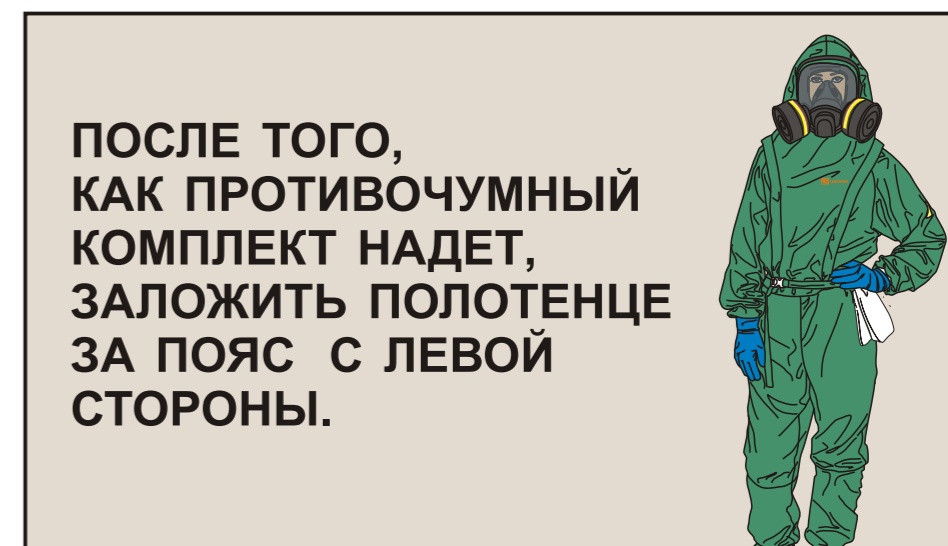

**ПОСЛЕ ТОГО, КАК ПРОТИВОЧУМНЫЙ КОМПЛЕКТ НАДЕТ, ЗАЛОЖИТЬ ПОЛОТЕНЦЕ ЗА ПОЯС С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ.**


**ПУТЁМ ВИЗУАЛЬНОГО ОСМОТРА СЕБЯ В ЗЕРКАЛЕ УБЕДИТЬСЯ, ЧТО ЭЛЕМЕНТЫ ЗАЩИТНОГО КОМПЛЕКТА НАДЕТЫ ПРАВИЛЬНО: ОТСУТСТВУЮТ НЕПОКРЫТЫЕ КОЖНЫЕ ПОКРОВЫ И ЗАЗОРЫ МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТАМИ КОМПЛЕКТА.**





# ПОРЯДОК СНЯТИЯ СИЗ

## PASTERIS

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
ДЛЯ РАБОТЫ С МИКРООРГАНИЗМАМИ

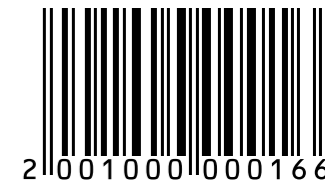

ПРОТИВОЧУМНЫЙ КОМПЛЕКТ С КОМБИНЕЗОНОМ

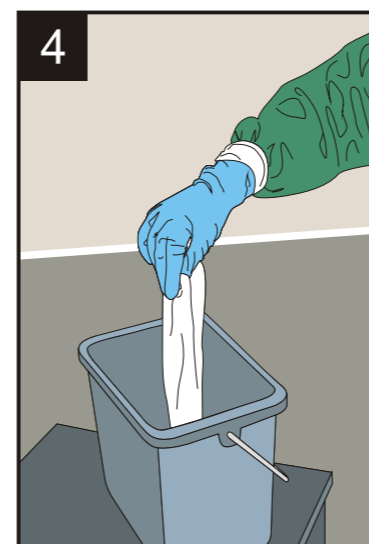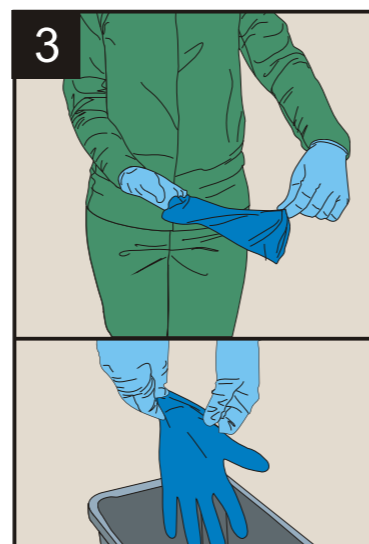

### ШАГ 1 ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПЕРЧАТОК

Погрузить руки в перчатках в дезинфицирующий раствор, тщательно обмыть со всех сторон.

### ШАГ 2 ДЕЗИНФЕКЦИЯ БАХИЛ

Поочередно ставя ноги в ёмкость с дезраствором, поднять наружную брючину, и протереть её внутреннюю поверхность и бахилу сверху вниз.

### ШАГ 3 СНЯТЬ ВЕРХНЮЮ ПАРУ ПЕРЧАТОК



Проверить их целостность (дезраствором). Погрузить их в ёмкость для обеззараживания.

### ШАГ 4 ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОЛОТЕНЦА

Достать полотенце из-за пояса и погрузить его в ёмкость для обеззараживания.

### ШАГИ 5-6 СНЯТЬ ОЧКИ И РЕСПИРАТОР (ПОЛНОЛИЦЕВУЮ МАСКУ)

Оттянуть очки от лица двумя руками в направлении вперед, затем вверх и назад за голову, снимая. Опустить в ёмкость для обеззараживания. Аналогично снять респиратор и погрузить в ёмкость для обеззараживания.

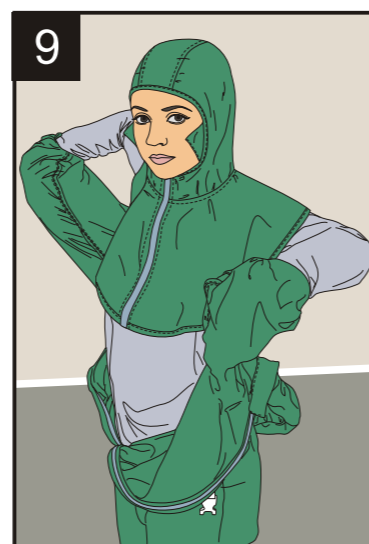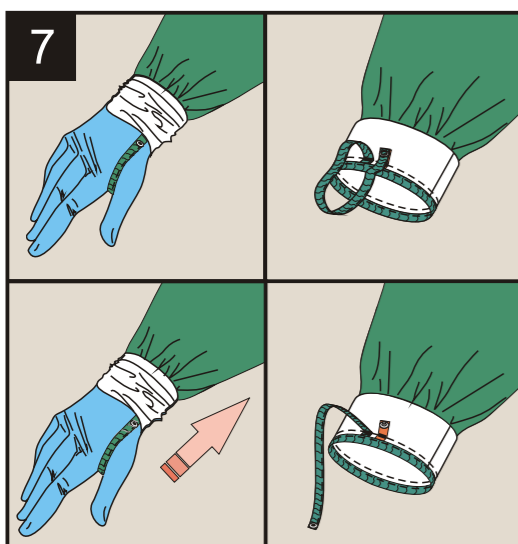

### ШАГ 7 РАССТЕГНУТЬ ПЕТЛЮ-НАПАЛЬЧНИК

Потянуть изделие за рукав в районе внутреннего локтевого сгиба на себя до щелчка. Фиксирующая кнопка расстегнется.

### ШАГ 8 СНЯТЬ БАХИЛЫ

Поднять наружную брючину, снять бахилы, расстегнув молнию и отгибая борты изнаночной стороной наружу. Погрузить в ёмкость для обеззараживания.

### ШАГ 9 СНЯТЬ КОМБИНЕЗОН

Расстегнуть молнию. Снять комбинезон, выворачивая его на изнанку. Погрузить в ёмкость для обеззараживания.

### ШАГ 10 СНЯТЬ ШЛЕМ

Расстегнуть молнию шлема. Собрать края пелеринки на затылке в одну руку и снять шлем. Погрузить шлем в ёмкость для обеззараживания.

### ШАГ 11 СНЯТЬ ПЕРЧАТКИ

Снять вторые перчатки с защитой от проколов и порезов и перчатки для переодевания, выворачивая наизнанку, и опустить их в ёмкость для обеззараживания.

**ВАЖНО!**


**ПЕРЧАТКИ  
ОБМЫВАЮТСЯ  
ДЕЗРАСТВОРОМ  
ПОСЛЕ СНЯТИЯ  
КАЖДОГО  
ЭЛЕМЕНТА  
ЗАЩИТНОЙ  
ОДЕЖДЫ**






# ПОРЯДОК СНЯТИЯ СИЗ

## PASTERIS

СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
ДЛЯ РАБОТЫ С МИКРООРГАНИЗМАМИ

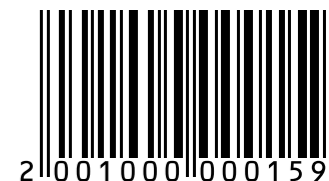

ПРОТИВОЧУМНЫЙ КОМПЛЕКТ С ХАЛАТОМ

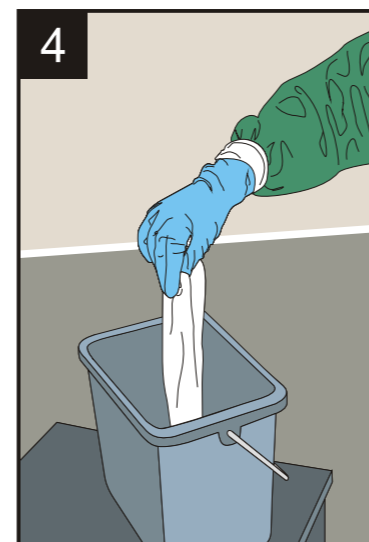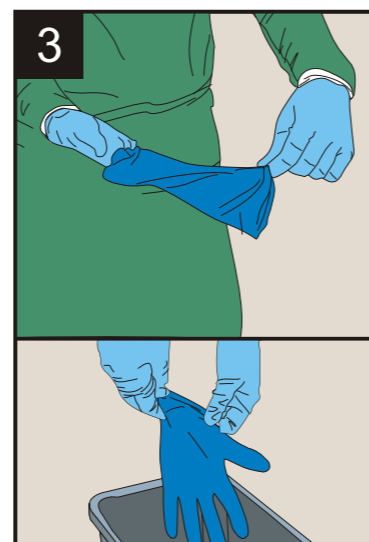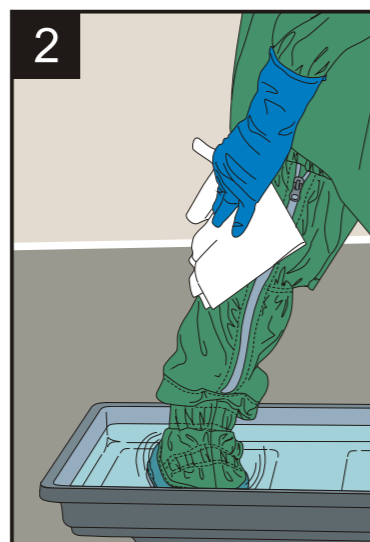

### ШАГ 1 ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПЕРЧАТОК

Погрузить руки в перчатках в дезинфицирующий раствор, тщательно обмыть со всех сторон.

### ШАГ 2 ДЕЗИНФЕКЦИЯ БАХИЛ

Поочередно ставя ноги в ёмкость с дезраствором, протереть бахилы сверху вниз.

### ШАГ 3 СНЯТЬ ВЕРХнюю ПАРУ ПЕРЧАТОК


Проверить их целостность (дезраствором). Погрузить в ёмкость для обеззараживания.

### ШАГ 4 ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПОЛОТЕНЦА

Достать полотенце из-за пояса и погрузить его в ёмкость для обеззараживания.

### ШАГИ 5-6 СНЯТЬ ОЧКИ И РЕСПИРАТОР (полнолицевую маску)

Оттянуть очки от лица двумя руками в направлении вперед, затем вверх и назад за голову, снять. Опустить в ёмкость для обеззараживания. Аналогично снять респиратор и погрузить в ёмкость для обеззараживания.

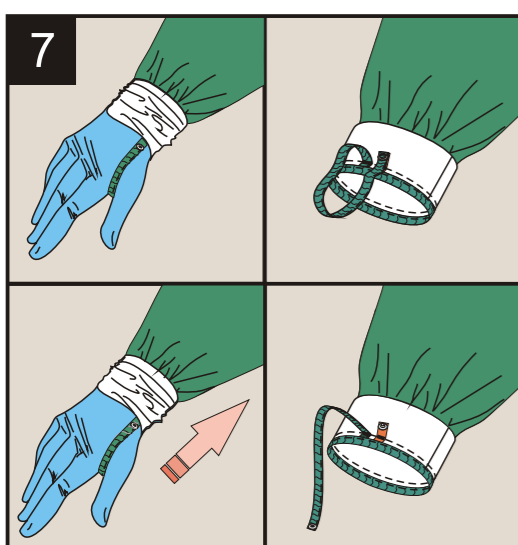

### ШАГ 7 РАССТЕГНУТЬ ПЕТЛЮ-НАПАЛЬЧНИК

Потянуть изделие за рукав в районе внутреннего локтевого сгиба на себя до щелчка. Фиксирующая кнопка расстегнется.

### ШАГИ 8 СНЯТЬ ХАЛАТ

Расстегнуть кнопки ворота, развязать наружный и внутренний пояса. Снимать халат, сворачивая наружную его поверхность внутрь. Погрузить халат в ёмкость для обеззараживания.

### ШАГ 9 СНЯТЬ ШЛЕМ

Расстегнуть молнию шлема. Собрать края пелерины на затылке в одну руку и снять шлем. Погрузить шлем в ёмкость для обеззараживания.

### ШАГ 10 СНЯТЬ БАХИЛЫ

Расстегнуть молнию и снять бахилу, отгибая борты изнаночной стороной наружу. Погрузить в ёмкость для обеззараживания.

### ШАГ 11 СНЯТЬ ПЕРЧАТКИ

Снять вторые перчатки с защитой от проколов и порезов и перчатки для переодевания, выворачивая наизнанку, и опустить их в ёмкость для обеззараживания.

**ВАЖНО!**


**ПЕРЧАТКИ  
ОБМЫВАЮТСЯ  
ДЕЗРАСТВОРОМ  
ПОСЛЕ СНЯТИЯ  
КАЖДОГО  
ЭЛЕМЕНТА  
ЗАЩИТНОЙ  
ОДЕЖДЫ**



# ПОРЯДОК СНЯТИЯ СИЗ

## PASTERIS


СРЕДСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ  
ДЛЯ РАБОТЫ С МИКРООРГАНИЗМАМИ

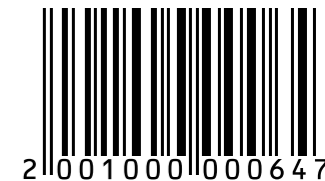

ПРОТИВОЧУМНЫЙ КОМПЛЕКТ С КОМБИНЕЗОНОМ (С ПОЛНОЛИЦЕВОЙ МАСКОЙ)




**ШАГ 1**  
**ДЕЗИНФЕКЦИЯ ПЕРЧАТОК И ПОЛОТЕНЦА**  
Обмыть руки в перчатках и промочить полотенце в дезрастворе.

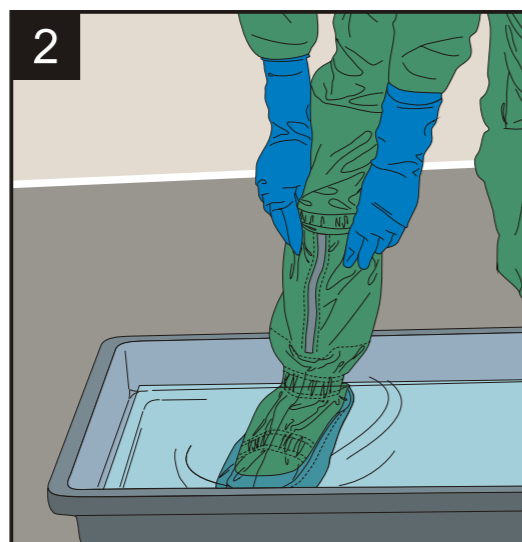


**ШАГ 2**  
**ДЕЗИНФЕКЦИЯ БАХИЛ** Поочередно ставя ноги в ёмкость с дезраствором, поднять наружную брючину, и протереть её внутреннюю поверхность и бахилу полотенцем сверху вниз.




**ШАГ 3**  
**ПРОТЕРЕТЬ МАСКУ**  
Протереть маску полотенцем, после чего опустить полотенце в дезраствор.

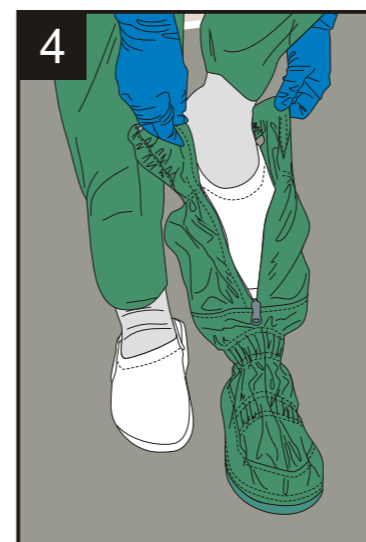

**ШАГ 4**  
**СНЯТЬ БАХИЛЫ**  
Поднять наружную брючину, расстегнуть молнию и снять бахилы, отгибая борты изнаночной стороной наружу.

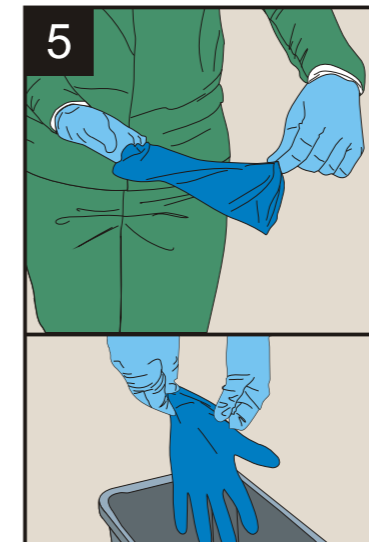


**ШАГ 5**  
**СНЯТЬ ВЕРХнюю ПАРУ ПЕРЧАТОК**  
Проверить их целостность (дезраствором).

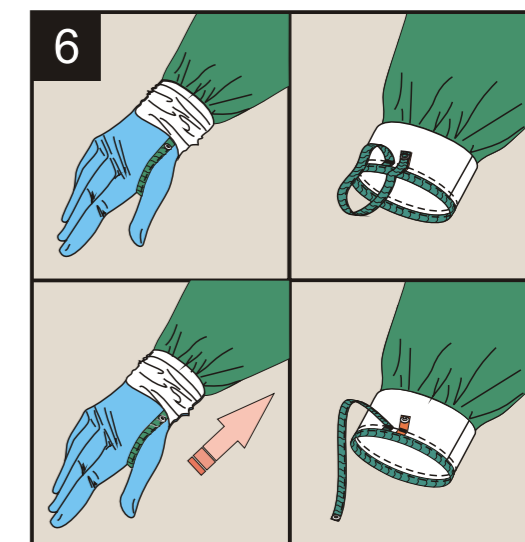

**ШАГ 6 РАССТЕГНУТЬ ПЕТЛЮ-НАПАЛЬЧИК**  
Потянуть рукав комбинезона в районе внутреннего локтевого сгиба на себя до щелчка. Фиксирующая кнопка расстегнется.



**ШАГ 7**  
**РАССТЕГНУТЬ КОМБИНЕЗОН**  
Отогнуть защитную планку и расстегнуть молнию.

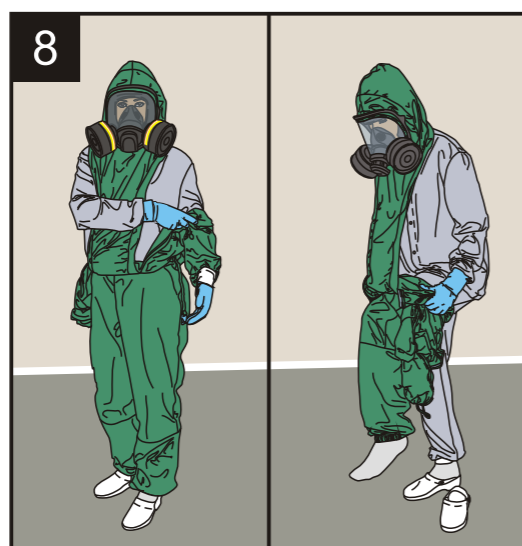

**ШАГ 8**  
**СНЯТЬ КОМБИНЕЗОН**  
Снять комбинезон, выворачивая его наизнанку, при этом петля-держатель маски остаётся на шее для удержания комбинезона на весу. Когда сняты рукава и брючины комбинезона, петлю-держатель снять через голову не касаясь головы и тела.



**ШАГ 9**  
**СНЯТЬ МАСКУ ПОЛНОЛИЦЕВУЮ**  
Отогнуть шлем изнаночной стороной наружу. Ослабить оголовье маски и снять, оттягивая его назад и вверх.



**ШАГ 10**  
**СНЯТЬ ФИЛЬТРЫ**  
Держа маску над ёмкостью с дезраствором, поочередно отсоединить фильтры и сложить их в ёмкость для обеззараживания.



**ШАГ 11**  
**СНЯТЬ ПЕРЧАТКИ**  
Снять вторые перчатки с защитой от проколов и порезов и перчатки для переодевания, выворачивая наизнанку, и опустить их в ёмкость для обеззараживания.

**ВАЖНО!**

**ПЕРЧАТКИ ОБМЫВАЮТСЯ ДЕЗРАСТВОРОМ ПОСЛЕ СНЯТИЯ КАЖДОГО ЭЛЕМЕНТА ЗАЩИТНОЙ ОДЕЖДЫ**